


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a TENSEL ME 2006

fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez

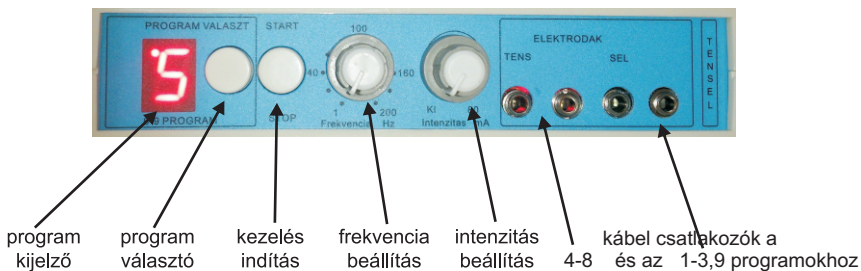

**HIBÁTLAN KÉSZÜLÉK VISSZAKÜLDÉSE ESETÉN A BEVIZSGÁLÁSÉRT
A SZERVIZ DÍJAT SZÁMÍTHAT FEL, EZÉRT KÉRJÜK ELŐBB TELEFONÁLJON!
SEGÍTÜNK! Telefon: +36 20 229 36 90 ÉS +36 88 450 702, H.–P.: 9–17 óráig.**

FONTOS TUDNIVALÓK

**IZOMKEZELÉSRE A 8; 6; 4 PROGRAMOKAT PRÓBÁLJA VÉGIG UGYANAZON ELEKTRODAFEL-
HELYEZÉS MELLETT! HA NEM SIKERÜLT MOZGÁST KIVÁLTANI, CSAK AKKOR PRÓBÁLJA A
3;2;1 PROGRAMOKAT IS. A LEGSZEBB MOZGÁST ADÓ PROGRAMOT HASZNÁLJA! (3-6
HAVONTA PRÓBÁLJA VÉGIG ÚJRA, MERT A KEZELÉSEK SORÁN MÁSIK PROGRAM
HASZNÁLATA VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ!)**

FIGYELEM!

- Csak a készülékkel szállított típusú adapterrel használja!
- Programválasztás után a VILÁGÍTÓ lyukba kell dugni a kábelt!
- Erősen nedves filclapokat használjon!
- A START gomb megnyomása előtt csavarja a FREKVENCIA és INTENZITÁS gombokat minimum állásba (balra, ütközésig).
- A START gomb megnyomása után óvatosan fel kell csavarni az INTENZITÁS gombot!
- Kezelés végén KI KELL HÚZNI a kábeleket a fekete gumilapokból! (Különbözően rászorulhat és egyenletlenné válhat a vezetőképesége, nem adva áramérzetet vagy kellemetlen érzetet adva.)
- Gyermekek kezelése előtt PRÓBÁLJA KI SAJÁT MAGÁN az áramérzetet!
- Kezelés közben ne dugja át a kábelvéget a másik lyukba!
- A Frekvencia gombot csak az 5. programnál lehet használni.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS ALKALMAZÁS

- Csatlakoztassa a fekete adaptert a készülék hátoldalában lévő csatlakozóaljzathoz, majd dugja be a fekete adaptert a fali konnektorba. A kijelzőn ekkor piros fény fut körbe.
- Helyezze a kék-fehér kábelek végeit egy-egy fekete gumi-elektrodába. (A csomagban 2 pár gumilap található, sima felével egymásnak fordítva.)
- Erősen nedvesítse meg a filclapokat és helyezze bele a gumilapokat. Helyezze a bőrre és rögzítse a ragasztószalaggal.
- Válassza ki a használni kívánt programot!
- Dugja be a kék-fehér kábel másik végét (egyes vég) a készülék előlapján világító lyukba.
- CSAVARJA MINDKÉT FORGÓGOMBOT (Frekvencia és Intenzitás) MINIMUM ÁLLÁSBA!
- Csak ez után indítsa a kezelést a START gombbal, majd óvatosan emelje az áram erősségét az intenzitás gombbal. (Ha ekkor a piros jel körbefut, a gombok nincsenek teljesen minimum állásban: kezdje előlről a beállítást.)

ÉLVEZZE A KEZELÉST ÉS KEZELÉS UTÁN LEGALÁBB 15 PERCET PIHENJEN!

- Kezelés végén nyomja meg a STOP gombot és csak EZUTÁN vegye le az elektródákat! A kihúzáskor ne a kábelt, hanem a „kosarat fogja”, nehogy megszakadjon a kábel, MAJD HÚZZA KI A KÁBELEKET A GUMILAPOKBÓL ÉS SZÁRÍTSAI!)

FIGYELEM!

Fém tárgy vagy fémprotézis ne kerüljön az elektródák közé, az áram útjába! Mobiltelefon használata közben kezelést ne végezzünk! Pacemakerrel rendelkezők, valamint lázas állapot és dagadtos megbetegedések esetén kérjük ki orvosuk véleményét! Nyílt sebre vagy beteg bőrfelületre ne tegye az elektródát! Párás, vizes helyiségben használni tilos! Doboz fedelét eltávolítani tilos! Másik adapterrel használni tilos! Ittas állapotban használni tilos! Nedves kézzel használni tilos! Tisztítás: alkoholos vagy enyhén nedves puha ruhával a műanyag részeket áttörölni. A fájdalom okát a kezelés megkezdése előtt ki kell vizsgáltatni.

A készülékkel szállított tartozékok: 1 db TENSEL készülék, 4 db elektróda, 4 db filclap, 2 db kábel, 1 db hálózati adapter, 1 db használati útmutató. Vásárolható kiegészítők: öntapadó-, gumi-, érzékeny bőrre való gumielektrodák-, inkontinencia elektródák, filctasakok, pontelektrodák az apróbb területek kezeléséhez.

TIPP: a gumilapok rögzítése megoldható gézcsíkkal, fáslival, vagy tépőzáras szalaggal is. (Egy pánt ami egyik oldalán tapad, másik oldalán tép - rövidáru boltokban olcsón kapható.)

PROGRAMOK ALKALMAZÁSI TERÜLETE ÉS LEÍRÁSA

PROGRAM	KEZELENDŐ PROBLÉMA	MŰSZAKI ADATOK
1. SZELEKTÍV INGERÁRAM	Idegvezetéssel nem rendelkező, izmokra. Első kezelés alkalmával 1–2 percenként ellenőrizni kell a bőr kipirultságát. (Részletesen lásd lejjebb.) KEZELESI IDŐ: napi 2x5-15 perc	Háromszög alak, 200msec imp. szélesség. Szünet idő 1,8 sec.
2. SZELEKTÍV INGERÁRAM	Idegvezetéssel nem rendelkező, izmokra. Első kezelés alkalmával 1–2 percenként ellenőrizni kell a bőr kipirultságát. (Részletesen lásd lejjebb.) KEZELESI IDŐ: napi 2x5-15 perc	Háromszög alak, 400msec imp. szélesség. Szünet idő 2,6 sec.
3. SZELEKTÍV INGERÁRAM	Idegvezetéssel nem rendelkező, izmokra. Első kezelés alkalmával 1–2 percenként ellenőrizni kell a bőr kipirultságát. (Részletesen lásd lejjebb.) KEZELESI IDŐ: napi 2x5-15 perc	Háromszög alak, 600msec imp. szélesség. Szünet idő 2,4 sec.
	Ha erősen kipirul a bőr, próbáljuk ki a 8;6;4 programokat is: A kezeléssorozat közben változhat az izom állapota, ehhez gyakran másik programot kell választani. Ha nem sikerül a 8;6;4 programokkal a megfelelő izommozgást kiváltani, telefonáljon, mert az érzetet több, egyéb ok is kiválthatja (L. Előforduló hibák táblázata hátrébb). Mi segítünk a csípő érzést megszüntetni! Kérésére visszahívjuk! Telefonos segítségnyújtásunkig átmenetileg naponta többször rövidebb ideig (napi 5 x 2 perc) kezeljünk! A sárga filclapnál jóval vastagabb nedves gézt tegyünk a fekete gumilapok alá a csípő érzet mérséklése érdekében. Esetleg pár perc kezelés után 1-2 percre pihentesse bőrét, majd újra 1-2 percre kezelhet összesen 6-10 percre, naponta 2-4 alkalommal. Az izmok rendszerint az izom eredés és tapadási helyén kezeljük, vagy az adott izom legszélesebb részén az „izomhason”. A pontos felhelyezést fizioterápiás vagy gyógytornász szakember, vagy kezelőorvosa mutatja meg. TIPP: szakember segítsége nélkül a bémult, sérült izmon a kívánt mozgás kiváltásához legmegfelelőbb elektródafelhelyezést az ép végtag azonos izmán kipróbálhatja a 4. programot alkalmazva. Azt a felhelyezést kell alkalmazni a beteg végtagon, aminél a kívánt izommozgást az ép végtagon a legszebben sikerült kiváltani!	

4. SZELEKTÍV INGERÁRAM BURST	A.) IZOMKEZELÉSRE (részlegesen bénult, idegsérült vagy ép izom) KEZELÉSI IDŐ: napi 2 x 5-15 perc, fokozatosan elérve a 15 percet. Az elektródapárok ennél a programnál időben eltoltan kezelnek, természetes izommozgást, kellemes masszázs érzetet eredményezve B.) FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA. KEZELÉSI IDŐ: napi 2 -3 alkalommal 30 perc. Krónikus fájdalmakra, masszázs érzettel.	Impulzus 0,2 msec. Burst 100 Hz/500 msec ideig. Szünet idő 1,5 sec.
	C.) Gyermekek fájdalomcsillapító kezelése	
	D.) inkontinencia-kezelés (vizelet-, széklet- vagy gáztartási zavarok) Számos esetben, ha a probléma izomrenyhésre vezethető vissza, VAN LEHETŐSÉGA GYORS JAVULÁSRA, A TÜNETEK ENYHÜLÉSÉRE, A MŰTÉTEK ELKERÜLÉSÉRE! Gyermekeknél csak a lelki okok kizárása után alkalmazzuk a készülékkel való kezelést! KEZELÉSI IDŐ: napi legalább 2 alkalommal 5-15 perc (fokozatosan 1-1 perccel emelkedő időtartam mellett érzjük el!) A lapelektrodák egyikét kell a fehér kábelvégbe tenni, ez kerül a hasra, a nagyobb hátra, a keresztcsontra (lásd 4. oldal). Speciális méretű elektródák is kaphatók, de csak akkor érdemes költeni rá, ha a fenti megoldásokat alkalmazva sem volna elégedett az eredménnyel. (A felületi elektródák és az igen költséges, külön vásárolható szondákkal végzett kezelések eredményessége betegeink visszajelzése alapján megegyezik.	
5. TENS FOLYAMATOS	Csak ennél a programnál használható a „FREKVENCIA” gomb, a többi programnál értelmetlen a beállítása. A beállítási javaslatokat felhasználóink visszajelzései alapján leellenőrizve állítottuk össze.	Változtatható frekvenciájú TENS impulzusok, 0,2 msec. Frekvenciatartomány 1-200 Hz. Folyamatos üzemmód.
	Akut fájdalom (derék vagy idegfájdalmak: 200 Hz).	Általánosan 80-200 Hz alkalmazható
	Krónikus fájdalom.	1-10 Hz (alacsony frekvencia-beállítás)
6. SZELEKTÍV INGERÁRAM	Részlegesen bénult, idegsérült vagy ép beidegzésű izmok kíméletes kezelése Az elektródapárok időben eltoltan kezelnek, természetes izommozgást, kellemes masszázs érzetet, optimális helyi bővérűséget eredményezve	HÁROMSZÖG MODULÁLT: Háromszöggel modulált négyszög impulzus 0,2 ms / 200 Hz. Háromszög moduláció: 700 ms felfutás 700 ms lefutás, 2s szünet.
7. TENS MASSÁZS	ELEKTROMASSÁZS, izomlazítás, stresszoldás, helyi bővérűség keltése (decubitus kezelések a „környéki” területen)	Frekvenciahinta, négyszög impulzus. Impulzus hossz: 0,2 ms

8. SZELEKTÍV INGERÁRAM	Idegserült, vagy ép beidegzésű renyhe, erősen sorvadtt izmok kezelése. Izomlazításra, masszázsra	(Eltolt háromszög) MODULÁLT négyszög impulzus. Impulzus hossz: 0,2 ms/200 Hz.
9. GALVÁN	Iontoforézishez vagy speciális galvánkezeléshez	Egyenáram.
	A Galvánprogrammal csak ép bőrfelületen, MAXIMUM 3 PERCIG KEZELJEN! KÖZBEN 1-2 PERCENKÉNT ELLENŐRIZZE A BŐRFELÜLET KIPIRULTSÁGÁT. HA ERŐSEN KIPIRUL, KEZELJEN A SZOMSZÉDOS BŐRFELÜLETEN. Diclofenac származékok a „-” lapelektroda alatt, a lidocain származékok a „+” lapelektroda alá kenve vihetők be a bőrbe. Ügyeljen arra, hogy a krém ne menjen be a fekete gumilap kábelnyílásába, mert egyenetlen áramérzetet okozhat!	

KEZELÉSI JAVASLATOK

IZOMKEZELÉS: Lásd a szelektív ingeráram programok leírása részben.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS:

MINDEN TESTRÉSZRE ALKALMAZHATÓ FELHELYEZÉS: Az áram folyjon át a két fekete gumilap között a fájdalom testrészen. (Műteti hegek mentén, izomcsomók, ízületek helyén) Első 1–2 kezelésnél a fájdalom központjától kissé távolabb kezeljünk (5–10 cm-re) majd kezelésenként közelebbítjük a fájdalomközpontot.


VÉGTAGFÁJDALMAK: kék (+) fehér (-)



NYAK-, HÁT-, DERÉKFÁJDALMAK:

A gerincoszlop két oldalán lazító („leszálló”) kezeléssel.

A gerincoszlop két oldalán „kereszt” felhelyezéssel fájdalmas területet közrefogva az azonos színű elektródavégek átlósan helyezkednek el.

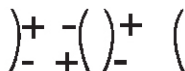

KISUGÁRZÓ FÁJDALMAK:

A fájdalom helyén és a kisugárzás mentén.




INKONTINENCIA

Lapelektrodák általános felhelyezése férfiaknak és nőknek



Lapelektrodák felhelyezése német módszer szerint

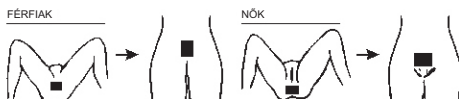

ELŐFORDULÓ HIBÁK Ha nincs áramérzet:	- Ellenőrizze, hogy a világító kábelcsatlakozó helyre dugta-e be a kábelt. Ha nem, nyomja meg a stop gombot és helyezze át a kábelt, majd a forgógombok lecsavarása után nyomja be a start gombot és emelje az intenzitást. - Előfordul, hogy csak 1 db gumielektrodát használ és nem legalább 1 párat (egyiket a fehér kábelhez, másikat a kék kábelhez rögzítve! 2 db-ot vagy 4 db-ot használjon!
Ha jelentősen gyengül az áramérzet: ok: - Gumielektroda előregedett - Szakadt pacienskábel - Idegsérült területen kezel - Nincs megfelelően csatlakoztatva	- Ki kell cserélni - Ki kell cserélni - Érzetkiesés a sérült ideg miatt - Ellenőrizze a helyes kontaktusokat!
CSÍP:	- több ok, TELEFONÁLJON SEGÍTÜNK! (Pl: nem jó programválasztás, mert idővel más áramformára lehet szükség! Elektroda ANYAG-HIBA, érzékeny bőr vagy ha nem távolítja el minden kezelés után a kábelvégről a gumilapokat, az nedves marad és korródeálódhat, egyenetlen vagy csípő érzetet okozhat stb)
Ha nem világít a készülék:	Az adaptert cserélni kell (ha az adapter világít, akkor is hibás lehet, pl. kábel megtörése esetén), ritkán a készülék csatlakozójának hibája okozhatja. Telefonáljon! Adapterhibával ne postázzon vissza hibátlan készüléket!
HA akadozik az áramérzet: oka: - Sérült pacienskábel vagy sérült adapter kábel - Nem távolította el a fekete gumilapokat kezelések után és azok rásültek a kábelvégre vagy nedvesek maradtak és korródeálták azt	- Ki kell cserélni - Ki kell cserélni a kábelt és a gumielektrodát
HA a start gomb megnyomása után a program nem indul: oka: - A Start gomb megnyomásakor az Intenzitás és/vagy Frekvencia gomb nem a minimum értéken állt.	Húzza ki az adaptert egy pillanatra és dugja be újra.
Ha hirtelen kellemetlen, erős áramérzetet érzlel: oka: - Program szünetidejében emelte az intenzitás értékét vagy - működés közben váltott programot vagy - krém került a kábel nyílásába a gumilapokban. - (átdugta a kábelt) a TENS-SEL bemeneteken vagy - nem távolította el a kábelvégekről a gumilapokat minden kezelés végén és idővel korródeálódott a kábelvég, egyenetlen áramérzetet okozva.	- Ne próbálja újra, telefonáljon vagy küldje vissza a csupasz készüléket!

Műszaki adatok:

Hálózati adapter	230 V 50 Hz/12 V 300 mA DC	Max kimenő feszültség	90 Vp
Max. kimenő áram			
Selektív üzemmód	40 mA +/- 15%	Működési hőm.tartomány	5-40 C°
Tens üzemmód	80 mA +/- 15%	Méret	180x45x115 mm
Galván üzemmód	25 mA +/- 15%	Tömeg	0.3 kg

A készülék jelöléseinek magyarázata



CE megfelelőségi jelölés,
2409 - Kijelölt szervezet azonosítója



A készülékkel kapcsolatos, a címkékről le nem olvasható elővigyázatossági figyelmeztetésekre hívja fel a figyelmet a jelölés. A vonatkozó figyelmeztetések a használati útmutatóban olvashatóak.



Gyártó szimbóluma



Dátum



Tartsa szárazon!

IP20

Víz- és porszerű részecskék
káros behatolása elleni védelem

SN

Gyártási szám



Elektronikai hulladék



BF TÍPUSÚ PÁCIENSRÉSZ



II. ÉRINTÉSVÉDELMI
OSZTÁLYÚ készülék



Olvassa el a használati útmutatót!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Cserét a fogyasztó az átadástól számított 3 napon belül kérhet.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálat gondoskodik. A gyártó a termékátadás napjától számított 12 hónapig a hatályos jogszabályok szerint kötelező jótállást vállal.

SZERVIZKÖNYV a TENSEL ME 2006 típusú gyári számú termékre: cégünk méltányosságból a fogyasztó részére történő átadástól számított 5 hónapon belül a fő részegység(gép)cseréjére nyújthat lehetőséget. Ezt az alábbi elérhetőségeinken kell igényelni: Gyártó, javítást végző szerviz neve, címe: TENSOL KFT., 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 3., telefon/fax: +36 88 450 702, mobil: +36 20 2293 690

ELADÓ SZERVE TÖLTI KI:

Eladó neve, címe:

Eladás, átadás kelte, bélyegzője:

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért az áru átadásakor adott Fize-tési bizonylattal együtt gondosan őrizze meg.
2. Elveszett jótállási jegyet és fizetési bizonylatot nem tudunk pótolni.
3. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervezetek.
4. Jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlán adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási határidő kezdete:

1. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás vagy ha üzembe helyezést valamelyik szervizünk végzi, az üzembe helyezés(beszabályozás) napjával kezdődik.

2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vásárló jótálláson és a szavatosságon alapuló jogai:

A vásárló Polgári Törvénykönyvről szóló 2002. évi XXXVI. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 306-307 paragrafusában, a 151/2003. (IX. 22) kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet meghatározott alábbi jogok illetik meg:

A termék meghibásodása esetén a vásárló:

- Elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést kérhet,
- A kijavítást, vagy kicserélést – figyelemmel a készülék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére – megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet.
- Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy a jótállásra kötelezett a kijavítást, illetőleg kicserélést nem vállalta vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, választása szerint megfelelő árszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől a termék visszavásárlását kérheti. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye az elállásnak.
- Ha a jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott időn belül nem vállalja, vagy nem végzi el, a vevő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja.

A Vásárló a termék kicserélését kérheti:

- Amennyiben a készülék a vásárlástól, vagy a szerviz általi üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül hibásodik meg és ezen időtartam alatt a vásárló bejelenti csereigényét a vásárlás helyén, készülékét azonos típusú új termékre cseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak kinél, mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javítások rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie.

A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását közölni.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

1. Ha a hiba jellege (pl. termék kijavíthatósága, a hiba keletkezésének oka, stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett (jótállási időtartama alatt) szakvéleményt szerez be.
2. A szakértő által végzett vizsgálat és szakvélemény nem díjmentes. Ha a forgalomba hozott áru az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgálat költsége a jótállót terheli. Ha a vásárló igényét a meghibásodás utáni két hónapon túl jelentette be, továbbá ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. rendeltetés ellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos behatolás) a vizsgálat költsége a vásárlót terheli.
3. További vita esetén az illetékes városi bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősségünk kizárása:

1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási vagy barkácsgép ipari termelő tevékenységre történő használata.)
2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk, és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:
A termék forgalomba hozatalát megelőző minőségvizsgálat a jótállási jegy tartalmára is kiterjed.
A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék megnevezését, típusát és gyári számát feltüntetni, a jótállási jegyet az eladás (üzembe helyezés) keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.

Angol feliratok jelentése a készülék hátoldalán: Electric parameters: elektromos paraméterek.
Power: Áram, Model: készülék megnevezése.Type: típus **SN: Gyártási szám**

KIBOCSÁTÁSI NYILATKOZAT

Cégünk a Tensol Orvosi Műszerfejlesztő Kft. Székhelye 8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 3. Mint gyártó kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy termékünk megnevezései a szelektív ingeráramú ideg és izomstimulátor készülékünk Típus: TENSEL me 2001; TENSEL me 2001+; TENSEL me 2006 készülékek, osztályba sorolás: II.a (a4/2009. (III.17.) EüM rendelet IX. melléklet, 9 szabály szerint) az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17) EüM rendelet és a 93/42 EGK direktíva követelményeinek megfelelőnek, különös tekintettel az I. sz melléklet alapvető követelményeinek.

Tensol Kft kijelenti, hogy a TENSEL me 2001 gyári számú készüléken 11301453 és a TENSEL me 2006 készüléken 61311105 valamint a TENSEL me 2001+ készüléken a mai naptól használja a CE2409 jelet. Tanúsító kijelölt szervezet neve, címe: 2040 Budaörs, Gyár u 2. Tanúsító kijelölt szervezet azonosítója 2409 Tanúsítvány száma: 144430-13-06-03 Tanúsítvány érvényessége 2016 június 20. (évente megújítva) CE Certiso Orvos és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft.

Balatonfüzfő, 2015.06.09

Szollár Szilvia ügyvezető

A használati útmutató utolsó felülvizsgálata: 2016.03.16. Ellenőrzési jegyző könyv **HU 1603/2006.**
Nyilvántartás azonosítható

SZERVIZKÖNYV

Jótállási jegy kötelező jótállási időre Levágandó jótállási javítási szelvények

Bejelentés időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás módja: Jótállás meghosszabbítva nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja: Munkaszám: Netto díjösszeg: Kelt: bélyegző olvasható aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: Eladó szerv: P.H. Aláírás
Bejelentés időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás módja: Jótállás meghosszabbítva nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja: Munkaszám: Netto díjösszeg: Kelt: bélyegző olvasható aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: Eladó szerv: P.H. Aláírás